





Datos del cliente.

Nombre:	DNI/NIF:
Dirección:	
e-mail:	Teléfono:
Forma de pago:	

 <p>Cinta adhesiva</p>	<p>Pliegue por aquí.</p>	Especie:
		Identificación: Nombre, nº anilla, etc.
		Mutación: (Variedad, cruce)
		Fecha de nacimiento:
		Id. muestra (a rellenar por el laboratorio)
 <p>Cinta adhesiva</p>	<p>Pliegue por aquí.</p>	Especie:
		Identificación: Nombre, nº anilla, etc.
		Mutación: (Variedad, cruce)
		Fecha de nacimiento:
		Id. muestra (a rellenar por el laboratorio)
 <p>Cinta adhesiva</p>	<p>Pliegue por aquí.</p>	Especie:
		Identificación: Nombre, nº anilla, etc.
		Mutación: (Variedad, cruce)
		Fecha de nacimiento:
		Id. muestra (a rellenar por el laboratorio)
 <p>Cinta adhesiva</p>	<p>Pliegue por aquí.</p>	Especie:
		Identificación: Nombre, nº anilla, etc.
		Mutación: (Variedad, cruce)
		Fecha de nacimiento:
		Id. muestra (a rellenar por el laboratorio)

Instrucciones para la toma y envío de muestras.

(Puede ampliar esta información en www.anddna.es)

Instrucciones para la toma de muestras.

Imprima tantas copias de la primera página de este documento como sea necesario en función del número de muestras a enviar.

Cumplimente los datos personales. La dirección de correo electrónico servirá para la comunicación de los resultados, asegúrese de que es perfectamente legible.

PLUMAS. Arranque 4-6 plumas. Es imprescindible que las plumas sean arrancadas, no sirven las de muda ni las que se caen solas. Es preferible que las plumas sean de tamaño medio. Si se trata de plumas en crecimiento **que muestran rastros de sangre** (como es el caso de aves muy jóvenes), son suficientes 2 plumas.

Péguelas con cinta adhesiva en el lugar indicado dejando libre el cañón (cálamo) de la pluma, que será la parte sobre la que realizaremos el análisis. Evite el uso de bolsas de plástico.



HISOPO BUCAL. Tome dos bastoncillos de algodón y elimine uno de los extremos. Inserte el otro extremo en la boca del ave y frote el interior de la garganta y boca con el bastoncillo, haciéndolo girar, durante 15 o 20 segundos. De esta forma recogemos células de la epidermis que serán sobre las que realizaremos el análisis. Péguelos con cinta adhesiva en el lugar indicado sin tocar el algodón. Evite el uso de bolsas de plástico.



Instrucciones para el envío:

*Doble la hoja de solicitud por la línea de puntos evitando que las muestras entren en contacto unas con otras.

*Realice el pago mediante:

-Transferencia bancaria - BBVA: ES41-0182-2100-65-0201706065

No olvide indicar en el concepto el nombre del solicitante al realizar los pagos.

-Pago por PayPal (incluye pago con tarjeta) realizando el pedido a través de la Tienda On-line de AndDNA.

*Envíe las solicitudes a (puede enviar varias solicitudes por sobre): **AndDNA**
c/ Juan Carlos I nº 4
Villaviciosa de Córdoba
14300 Córdoba

*El plazo para la obtención de los resultados oscila entre 3 y 7 días laborables (desde la recepción de las muestras en el laboratorio). Los resultados se comunicarán mediante correo electrónico.

*Para cualquier duda póngase en contacto con nosotros escribiendo a: info@anddna.es o llamando al **693016736**.